



## Szyft na hemoroidy

Opakowanie zawiera: 1 szyft Hemorex wielokrotnego użytku w opakowaniu z zamknięciem gwarancyjnym wraz z instrukcją użycia.

Szyft jest od razu gotowy do aplikacji po nawilżeniu lubrykantem (np. wazeliną).

Spis treści ulotki informacyjnej:

1. Co to jest Hemorex?
2. Działanie
3. Jak stosować szyft Hemorex?
4. Dla kogo przeznaczony jest szyft Hemorex?
5. Przechowywanie

### 1. Co to jest Hemorex ?

Wyrób medyczny Hemorex jest szyftem chłodzącym, wykonanym z wysokogatunkowego plastiku przy użyciu nowoczesnych technologii. Anatomiczny kształt cylindrycznej tubki i komfortowy rozmiar zapewniają wygodę użycia, przynosząc natychmiastową ulgę, kojąc ból i świąd wywołany przez dolegliwości hemoroidalne.

Hemorex wykorzystuje system delikatnego chłodzenia – zawiera specjalną substancję, którą można wielokrotnie zamrażać i rozmrażać. Substancja została szczelnie zamknięta w cylindrze szyftu co uniemożliwia jej kontakt z ciałem i służy jedynie do przekazywania chłodu w ściśle określonym czasie i miejscu.

Uzyskana w domowych warunkach niska temperatura jest całkowicie bezpieczna dla organizmu i nie powoduje jakichkolwiek powikłań.

**Wyrób medyczny Hemorex ma wysoką skuteczność i przynosi natychmiastową ulgę.**

Szyft Hemorex jest przeznaczony do wielokrotnego użytku i nie generuje żadnych dodatkowych kosztów, do wprowadzenia go jest potrzebny wybrany przez pacjenta lubrykant, np. wazelina.

### 2. Działanie:

Hemorex to nowoczesny specjalistyczny szyft chłodzący na hemoroidy, wielokrotnego użytku:

- ma wysoką skuteczność i daje natychmiastową ulgę,
- usuwa ból, świąd, pieczenie, obrzęk oraz inne dolegliwości hemoroidalne,
- skutecznie i naturalnie leczy wewnętrzne i zewnętrzne żylaki odbytu,
- jest wykonany z wysokogatunkowego tworzywa przy użyciu najnowocześniejszych technologii,
- do samodzielnego stosowania w domu – bezpieczeństwo i dyskrecja,
- brak przeciwwskazań do stosowania,
- nie wywołuje interakcji ani alergii,
- jest nietoksyczny,
- nie brudzi bielizny ani nie powoduje innych zabrudzeń,
- koi podrażnione żyły dzięki specjalnemu systemowi chłodzenia.

Stosowanie Hemorexu powoduje rekuperację struktur hemoroidów i całkowite ich zaleczenie. W trakcie stosowania Hemorexu nie zachodzi potrzeba stosowania innych środków medycznych, o ile lekarz nie zaleci inaczej.

### 3. Jak stosować szyft Hemorex?

Przed każdym użyciem szyft Hemorex musi być schłodzony (min. 2 godz.) w zamrażalniku. Każdorazowa doodbytnicza aplikacja powinna trwać 6-8 minut i może być powtarzana w ciągu dnia tyle razy ile to jest konieczne. Zaleca się aplikację minimum dwa razy dziennie przez co najmniej czternaście dni – do ustąpienia ostrych objawów. Następnie liczbę aplikacji można stopniowo zmniejszać. Po uzyskaniu zadowalających rezultatów leczenia Hemorex należy stosować profilaktycznie minimum raz w tygodniu.

W leczeniu zewnętrznych żylaków odbytu, szyft stosować identycznie, według załączonej instrukcji.


Uwaga! Należy umyć ręce przed i po każdorazowej aplikacji szyftu Hemorex.

Szyftu Hemorex można używać wielokrotnie zgodnie z potrzebą przez okres 6 miesięcy od pierwszego zastosowania, potem należy go wyrzucić do pojemników na odpady plastikowe.

**Rekomenduje się użycie Hemorexu w sekwencji jeden za drugim, co znacznie przyspiesza efekt końcowy. UWAGA!**

Ze względu na fakt, iż hemoroidy mogą towarzyszyć innym schorzeniom, jeżeli po 3 tygodniach stosowania Hemorexu nie nastąpi zauważalna poprawa, należy zasięgnąć porady lekarza.

#### Instrukcja stosowania wyrobu medycznego Hemorex:

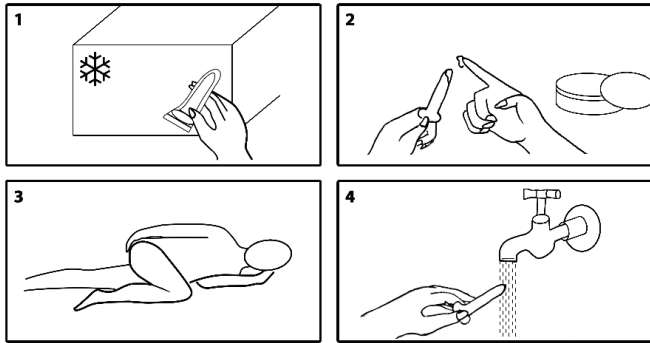

1. Wyjmij Hemorex z zamrażalnika. Powinien się w nim znajdować przynajmniej przez 2 godziny przed użyciem.

2. Nałóż wybrany przez siebie lubrykant (może być wazelina kosmetyczna, lub dowolny żel czy lubrykant przeznaczony do użytku w okolicach odbytu) na sztyft Hemorex

3. Połóż się na boku, zegnij nogę na której nie leżysz i podciągnij ją do klatki piersiowej. Rozluźnij się a następnie powoli i delikatnie wprowadź aplikator do otworu odbytniczego i pozostaw na 6-8 minut, do czasu gdy sztyft osiągnie temperaturę twojego ciała.

4. Po wyjęciu umyj aplikator mydłem i ciepłą wodą oraz zdezynfekuj go np. medycznym płynem do dezynfekcji, wodą utlenioną, czy spirytusem salicylowym

**UWAGA Nie używaj gorącej wody do sterylizacji i nie gotuj aplikatora, bo spowoduje to jego uszkodzenie!**  
Następnie włóż Hemorex do pojemnika i połóż w zamrażalniku. Powinien się w niej znajdować minimum 2 godziny przed każdą aplikacją.

#### 4. Dla kogo przeznaczony jest sztyft na hemoroidy Hemorex?

Wyrób medyczny Hemorex jest w pełni bezpieczny i nie wywołuje żadnych interakcji ani alergii, dlatego może być stosowany przez wszystkie osoby cierpiące na dolegliwości związane z hemoroidami.

Jest polecany zarówno dla kobiet jak i mężczyzn w każdym wieku, a także po konsultacji z odpowiednim lekarzem dla dzieci cierpiących na dolegliwości hemoroidalne.

Polecany jest osobom, którym dolega świąd, pieczenie, ból, obrzęk i inne dolegliwości hemoroidalne. Szczególnie dla:

- kobiet w okresie ciąży i po porodzie,
- osób, których zawód wymaga wielogodzinnego siedzenia (np. kierowców) oraz osób podnoszących duży ciężar
- osób mających dietę ubogą w błonnik,
- osób z nadwagą wywołującą dolegliwości naczyniowe,
- osób z nadciśnieniem,
- alergików,
- diabetyków,
- sportowców,
- dla wegetarian i wegan, ponieważ nie zawiera żadnych substancji odzwierzęcych, ani nie jest testowany na zwierzętach.

**Ciąża i karmienie:** Wyrób medyczny Hemorex może być stosowany przez kobiety w ciąży oraz karmiące piersią.

**Skonsultuj z lekarzem:** Jeśli jesteś w ciąży oraz przed zastosowaniem u dzieci.

#### 5. Przechowywanie:

Wyrób medyczny Hemorex należy przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu.

Użytkowanie tylko zgodnie z wymogami producenta, według załączonej instrukcji.

Data ostatniej aktualizacji instrukcji używania wyrobu medycznego Hemorex: październik 2013 r.

Wytwórca:

Korporacja Gazolina Sp. z o.o.,  
ul. Jagiellońska 7  
14-220 Kisielice

Wyprodukowano w Polsce.

[www.hemorex.pl](http://www.hemorex.pl)

